



Záruka a zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie o obmedzenej záruke a zrieknutí sa zodpovednosti

Obmedzená záruka | Zrieknutie sa zodpovednosti a príslušnosť súdu

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Owlet zaručuje, že inteligentná ponožka Smart Sock™ 2 od Owlet nebude pri bežnom používaní a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu jedného (1) roku od dátumu nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe. Táto obmedzená záruka sa poskytuje iba pôvodnému kupujúcemu tejto inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet.

Spoločnosť Owlet môže podľa svojho uváženia nekvalitnú inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet alebo jej chybný diel (chybné diely) opraviť alebo vymeniť v súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky. Pre náhradný výrobok platí záruka iba do konca platnej záručnej lehoty pôvodného výrobku. Táto obmedzená záruka neplatí v prípadoch, keď bol detský monitor Owlet poškodený následkom nesprávneho používania, úprav alebo nesprávnej údržby. Táto obmedzená záruka je jedinou zárukou pre inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet. Nikto nemá právo poskytovať v mene spoločnosti Owlet žiadnu inú záruku. Niektoré štáty neumožňujú obmedziť dobu trvania implicitnej záruky alebo vylúčiť náhodné alebo následné škody, takže tieto obmedzenia a vylúčenia pre vás nemusia platiť. Táto obmedzená záruka vám zaručuje určité zákonné práva a v závislosti od zákonov vášho štátu môžete mať zaručené aj ďalšie práva.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet a aplikácia Owlet majú slúžiť ako pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospeléj osoby.

Používaním inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet používateľ súhlasí a potvrdzuje, že spoločnosť Owlet Baby Care Inc. vrátane jej zástupcov, zamestnancov, investorov a členov nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody na majetku ani za zranenie osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním detského monitora od Owlet, a to bez ohľadu na príčinu.

Inteligentná ponožka Smart Sock 2 od Owlet je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na inteligentnej ponožke Smart Sock 2 od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskeho monitorov.

Upozornenie:

- Inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.
- Inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.

Používaním inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet používateľ súhlasí a potvrdzuje, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s jej používaním sa budú riešiť v treťom súdnom okrese Salt Lake County, štát Utah, Spojené štáty americké.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet. Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletne informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke www.owletcare.com/setup.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržujte ich.



Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie!
Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, „POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

POZOR = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

UPOZORNENIE = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.

VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock 2 nie je zdravotnícka pomôcka.



Ponožka Smart Sock 2 od Owlet vás upozorní, ak pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu. Ponožka Smart Sock 2 je určená pre novorodencov do osemnástich (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemnásť (18) mesiacov. Inteligentná ponožka Smart Sock 2 od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka. Inteligentná ponožka Smart Sock 2.

- Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmierňovanie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej choroby ani zranenia.
- Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
- Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
- Nezabráňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNUK).

Primárnym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre správnu inštaláciu a používanie inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet a vysvetliť funkcie, obsluhu, bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s inteligentnou ponožkou Smart Sock 2 od Owlet. Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto inteligentnú ponožku Smart Sock 2 používať alebo nastavovať, si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

Ak týmto pokynom nerozumiete, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese contact@owletcare.com alebo na telefónnom čísle 1 844 334-5330 v čase Po-So od 7:00 do 21:00.

PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA



- ZÁKLADŇU VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIELKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENÁŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKŔTENIA.
- INTELIGENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK 2 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHLAD DOSPELEJ OSOBY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPOROM KYSLIKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 2 OD OWLET S VAŠIM LEKÁROM.
- VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytné budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Riešenie problémov

Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

Základné nastavenia

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi sieť inteligentnej ponožky Smart Sock 2.	■ Základňa nie je zapnutá. ■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 2. ■ Základňa je mimo dosahu.	■ Základňu zapojte do zásuvky. ■ Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte v založení vášho účtu v aplikácii. ■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.
■ V aplikácii Owlet nevidím našu domácu Wi-Fi sieť.	■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok Owlet podporuje iba 2,4GHz pásmo). ■ Možno máte skrytý router.	■ Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2,4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2,4GHz sieť). ■ Pokyny pre skryté routery nájdete na owletcare.com/support .
■ Základňu nejde pripojiť k domácej Wi-Fi sieti.	■ Nesprávne heslo ■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. ■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	■ Skontrolujte heslo k vašej sieti. ■ Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odnesť späť do detskej izby. ■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti. ■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Základňa po odpojení inteligentnej ponožky Smart Sock svieti bielo.	■ Prebieha aktualizácia softvéru.	■ Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.
■ Základňu nejde spárovať s mojim účtom Owlet.	■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. ■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“	■ Overte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. ■ Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova pokúsite spárovať váš účet Owlet. ■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2,4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.

*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese contact@owletcare.com alebo na telefónnom čísle +1 (844) 334-5330 v čase Po-So od 7:00 do 21:00.

Na všeobecné otázky vám radi odpovieme na našom chate owletcare.com/chat.

Alarmy

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Základňa bliká modro a pípa.	■ Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock. ■ Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. ■ Slabá alebo vybitá batéria	■ Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej ponožke Smart Sock. ■ Zmeňte polohu bábätka alebo zväzťe, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevypnete monitorovanie. ■ Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.
■ Základňa bliká červeno a pípa.	■ Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia ■ Nízka hladina kyslíka ■ Inteligentná ponožka Smart Sock nesedí na nožičke.	■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom. ■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. Môže sa zbytočne spustiť alarm.) ■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. ■ Zväzťe, či nepoužívate inú veľkosť látkovej ponožky.
■ Základňa bliká žltá a pípa.	■ Problémy so získavaním údajov ■ Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená. ■ Svetlo v miestnosti je príliš jasné.	■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom. ■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje a môže sa zbytočne spustiť alarm). ■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. ■ Sťmte svetlo v miestnosti.

Pripojenie

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Základňa nie je pripojená k internetu.	■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. ■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	■ Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevriešia). ■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Inteligentná ponožka Smart Sock sa nenabíja.	■ Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená. ■ Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie.	■ Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa neozve cvaknutie a nezačne zeleno blikat. ■ Vypnite a znova zapnite elektronickú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.
■ Namiesto údajov o pulzovej frekvencii a hladine kyslíka vidno pomlčky.	■ Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spoľahlivé údaje. ■ Bábätko príliš pohybuje nožičkou. ■ Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock ■ Zle padnúca látková ponožka	■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky. ■ Dieťa nedávajte do koľsky ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia. ■ Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená. ■ Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.

Tipy pre zdravé prostredie počas spánku

Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

- Bábätko by malo byť v postieľke samo a ležať na chrbte. Spanie na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.
- Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na pohovke alebo v kresle.
- Pre bábätko kúpte postieľku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postieľky dobre pasuje a oblečte ho do dobre priliehajúcej postelnej bielizne.
- Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne a podobných predmetoch.
- Do postieľky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo ťažké predmety. To znamená vankúše, deky, prikrývky, ochranné obloženie do detskej postieľky, plyšáky, hračky a všetky mäkké predmety.
- Nepoužívajte vankúše, polohovacie klíny ani fixačné podložky na podopretie bábätká, udržanie bábätká na chrbte alebo aby ste mu zabránili v otočení.
- Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko udrží v teple a bezpečí.
- Dbajte, aby sa bábätko nadmerne nezahrialo. Bábätku obliekajte ľahké pyžamko a v miestnosti udržiavajte teplotu, ktorá je príjemná pre ľahko oblečeného dospelého.
- S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo spať v samostatnej postieľke blízko vašej postele. Bude tak v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.
- Zvážte, či bábätku počas odpoľudňajšieho a večerného spánku nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov, až si zvyknú na dojčenie.
- O týchto zásadách bezpečného spánku poučte všetkých, ktorí sa budú o bábätko starať!